

PHILIPS
RESPIRONICS

Wisp

Mascarilla nasal pediátrica

Dulce despertar

Corrector de fugas

Para un ajuste menos intrusivo

Clips de ajuste a presión

con correas ajustables para un ajuste rápido y fácil

Clips 1104974

Funda de tubo opcional

con lazo para el manejo del tubo

Tubo con funda 1104977

Arnés con correa para la coronilla

Arnés 1104973

Mascarilla nasal Wisp pediátrica

FitPack con orificio de exhalación 1104961

El FitPack incluye 3 tamaños de almohadillas (SC Pequeño, SC Mediano, SC Grande), 1 montura y 1 arnés.

Diseño de la almohadilla

Tecnología de Auto Seal de ajuste a presión que proporciona un mínimo contacto

SC Pequeño 1104969

SC Mediano 1104970

SC Grande 1104971

Montura de tela suave

Montura 1104972

Codo giratorio de 360°

para libertad de movimiento del niño

Codo SE 1104976

Consejos útiles

Si desea recibir más consejos de ajuste, averiguar cómo realizar ajustes en caso de fuga o consultar las instrucciones de limpieza, eche un vistazo a nuestras guías de vídeo; visite: www.philips.es/saos



- Lave a mano la mascarilla entera antes de usarla (consulte el apartado sobre cuidados de la mascarilla en las instrucciones de uso). Lave la cara del niño. No le aplique hidratantes ni lociones en la cara.
- Hay tres tamaños de almohadillados (SC Pequeño, SC Mediano, SC Grande) disponibles. Coloque el medidor de tamaño del almohadillado debajo de la nariz del niño para determinar el tamaño.
- El error más habitual que se comete en el proceso de ajuste es ajustar demasiado el arnés. Está atento a cualquier signo de presión excesiva, como enrojecimiento, escaras o abultamiento de la piel alrededor de los bordes de la mascarilla.

Instrucciones de ajuste

Con la mascarilla Wisp pediátrica es fácil conseguir el ajuste adecuado. Solo tienes que seguir las instrucciones indicadas a continuación. En primer lugar, seleccione el tamaño de almohadillado correcto. Hay tres tamaños de almohadillado disponibles:



SCS (pequeño)




SCM (mediano)



SCL (grande)



1 Utilice el medidor para seleccionar el almohadillado que se ajuste al ancho de la nariz del niño sin bloquear las fosas nasales.

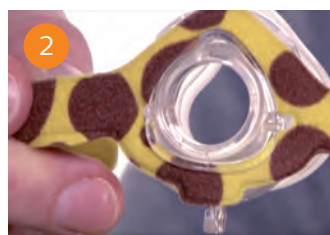

2 Acople el almohadillado a la mascarilla con el clip de corrector de fugas apuntando hacia abajo.



3 Gire los enganches del arnés y desconéctelos de la mascarilla.



4 Con el clip del corrector de fugas apuntando hacia abajo, coloque el almohadillado sobre la nariz del niño.



5 Coloque el arnés sobre la cabeza del niño y presione los enganches del arnés para colocarlos en su sitio.



6 La parte superior del almohadillado debe quedar en el puente de la nariz, y no debe bloquear las fosas nasales.



7 Ajuste las correas superiores e inferiores hasta lograr una posición cómoda. Ajuste la correa para la coronilla y asegúrese de que la mascarilla no toque los oídos.



8 Conecte el tubo y el conector giratorio del codo de la mascarilla Wisp pediátrica a la parte delantera de la mascarilla.

